

JONASET VÄRMEMASK

Jonaset värmemask hjälper dig att röra dig utomhus i kallt väder. Jonaset värmaren har ett filter av stål som lagrar utandningsluftens värme och använder den till att värma upp inandningsluften. Samtidigt fuktar filtret den torra och kalla luften och gör den behagligt fuktig för kroppen.

BRUKSANVISNING

1. Jonaset värmaren fästes under ett halsskydd, en huva eller en halsduk. Använd antingen den tunnare vita värmaren eller den effektivare blåa värmaren beroende på väder och användningsändamål.
2. Placera värmemasken med omsorg så att den täcker munnen och näsan, men inte ögonen. Forma värmaren vid behov genom att böja stålfiltret lätt så att det följer formen på ditt ansikte eller klipp av kanterna på masken med en sax. Täck inte stålfiltret med andra stickade produkter än tillverkarens egna som har ett tillräckligt lågt andningsmotstånd.
3. Personer som använder glasögon kan böja till metallfästet i övre delen av värmaren för att förhindra att det bildas imma på glaset. Upphör omedelbart att använda värmemasken, om det trots allt bildas imma på glasögonen, till exempel när du kör bil eller i andra potentiellt farliga situationer.
4. Produkten är endast avsedd för uppvärmning av inandningsluften och den filtrerar inte till exempel mikropartiklar.
5. Produkten är avsedd för personligt bruk. Rengör alltid värmaren efter användning under rinnande vatten. Utför en grundligare rengöring med flytande tvättmedel 2–3 gånger i veckan beroende på hur ofta du använder produkten. Obs! Värmarens mjuka kanter tål inte över 60 °C värme.
6. Värmaren är tillverkad av polyetenskum som känns behagligt mot huden och av rostfritt syrabeständigt stål. Produkten ska slängas med blandavfall och metalldelarna med metallavfall.

Suomen Jonas Oy
PL30, FIN 00661 HELSINKI
TEL: +358-9-7243 538
E-Mail: jonas@jonas.fi

JONASPORT VÄRMEMASK

Jonasport är en värmemask som hjälper dig att röra dig utomhus i kallt väder. Jonasport värmaren har ett filter av stål som lagrar utandningsluftens värme och använder den till att värma upp inandningsluften. Samtidigt fuktar filtret den torra och kalla luften och gör den behagligt fuktig för kroppen.

BRUKSANVISNING

1. Jonasport värmaren hålls stadigt på plats med hjälp av ett kardborreband. Placera det förgrenade bandet tillräckligt högt upp runt huvudet. Placera värmaren med omsorg så att den täcker munnen och näsan, men inte ögonen.
2. Stålfiltret får inte övertäckas. Forma värmaren vid behov genom att böja stålfiltret lätt så att det följer formen på ditt ansikte.
3. Personer som använder glasögon kan böja till metallfästet i övre delen av värmaren för att förhindra att det bildas imma på glaset. Upphör omedelbart att använda värmemasken, om det trots allt bildas imma på glasögonen, till exempel när du kör bil eller i andra potentiellt farliga situationer.
4. Produkten är endast avsedd för uppvärmning av inandningsluften och den filtrerar inte till exempel mikropartiklar.
5. Produkten är avsedd för personligt bruk. Rengör alltid värmaren efter användning under rinnande vatten. Utför en grundligare rengöring med flytande tvättmedel 2–3 gånger i veckan beroende på hur ofta du använder produkten. Obs! Värmarens mjuka kanter tål inte över 60 °C värme.
6. Värmaren är tillverkad av polyetenskum med tygöverdrag som känns behagligt mot huden, rostfritt syrabeständigt stål och gummi- och kardborreband. Produkten ska slängas med blandavfall och metalldelarna med metallavfall.

Suomen Jonas Oy
PL30, FIN 00661 HELSINKI
TEL: +358-9-7243 538
E-Mail: jonas@jonas.fi